


Kontrollera om tecken på plötsligt hjärtstillestånd finns:
☒ Reagerar inte ☒ Andas inte normalt


1

STARTA

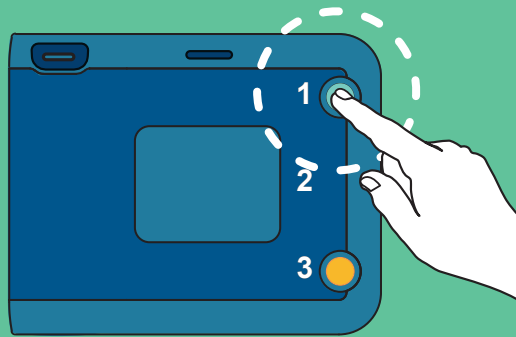


2

PLACERA
ELEKTROD-
ERNA

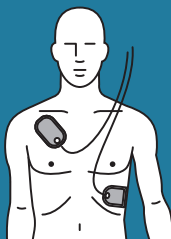

3


TRYCK PÅ
DEFIBRIL-
LERINGS-
KNAPPEN

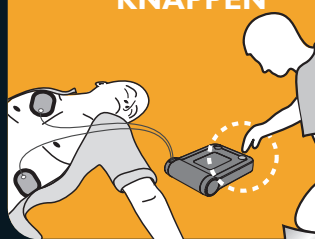

SNABBREFERENS


1

STARTA

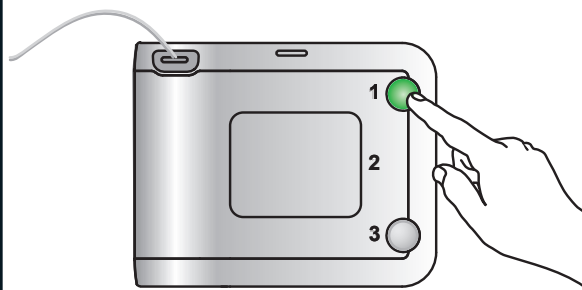


2

Bar bröstkorg. Rengör och torka om det behövs.

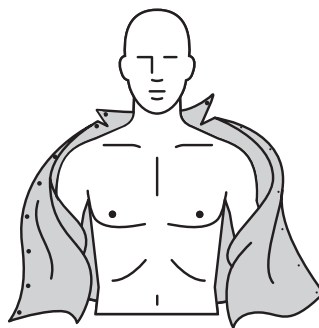


3

Öppna det grå plastfodralet.

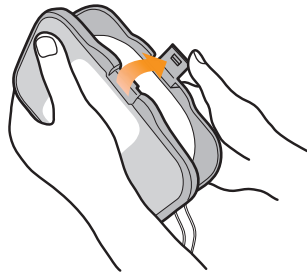


4

Dra bort elektroderna.

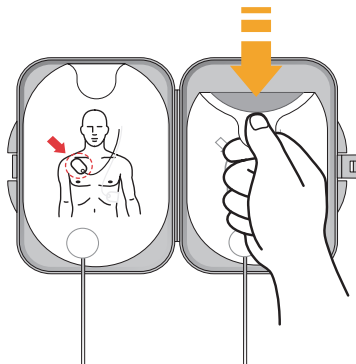

5

Placera elektroderna
på bröstkorgen.

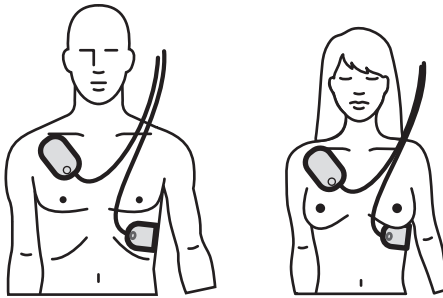

6

Analyserar ... Gå åt sidan

VÄNTA TILLS




SLUTAR BLINKA



7

Tryck på den blinkande orange defibrilleringsknappen.

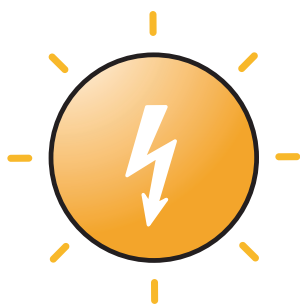

8

Om du vill ha hjälp med hjärt-lungräddning: Tryck på den blinkande blå knappen.




BARN OCH SPÄDBARN

< 25 kg/55 lbs (0–8 år)




BARN OCH SPÄDBARN

Sätt i nyckeln vid början
av återupplivningen.

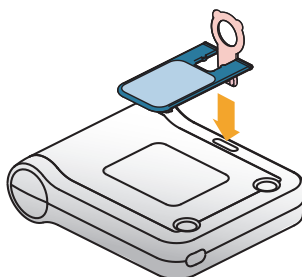

Placera elektroderna på
ryggen och bröstkorgen.

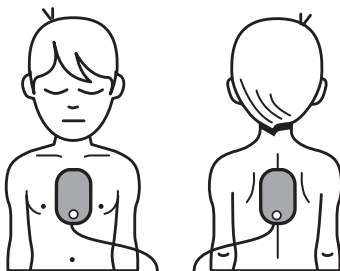



Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431, USA



Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard Str. 2
71034 Boeblingen, Germany

Copyright © 2017
Koninklijke Philips N.V.

MADE IN USA

453564682841 REV I

CE 0123

R_X ONLY

REF 989803167311



453564682841

PHILIPS